

器(47) 類別注射針及び穿刺針  
歯科用貼薬針 70679000

再使用禁止

### 販売名：マイクロチップ

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用はしないこと。
- 感染防止のため、清潔なものを使用すること。

#### 【形状・構造及び原理等】



型番： マイクロチップ レギュラー（先端径 1.5mm）  
マイクロチップ ファイン（先端径 1.0 mm）

#### 成分：

アプリケーター作業部：プラスチックファイバー  
アプリケーターハンドル部：プラスチック  
ホルダー：耐熱プラスチック

#### 【性能・使用目的・効能または効果】

口腔内で貼薬を行う。シーラント、ボンディング、ライニング、フッ素塗布等に使用のディスプレイブラシ。  
アプリケーター先端はマイクロファイバーブラシになっている。大きな窩洞部分へのプライマー、ボンディングの塗付にも使用可能。アプリケーター先端は、塗付部位によって角度調整が可能。

#### 【品目仕様等】

FDA, ISO 9001: 2008 の規準に対応

#### 【操作方法又は使用方法等】

アプリケーターを回しながらホルダーに装着。アプリケーターはホルダーの両端に装着可能。塗付部位、または必要に応じてアプリケーター先端部の角度を調整して使用。

#### 【使用上の注意】

器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。  
歯科医療有資格者以外は使用しないこと。  
使用目的以外に使用しないこと。必要以上の力を加えないこと。  
破損や事故の原因となるので、切削・打刻・曲げなどの改造は絶対に行わないこと。  
1回限りの使用で使い捨てることとし、再使用は避けること。  
ホルダーの保持力が低下した際には、速やかに新しいホルダーと交換すること。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。  
汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管、管理すること。  
水分が付着したまま保管しないこと。  
ホルダーは 121 以下でオートクレーブ滅菌可能。ホルダー消毒の際は、薬液消毒を行うこと。  
傷の原因となるので、ホルダーを持亜塩系酸ソーダ、過炭酸ソーダ、フェノール、クレゾール等で消毒しないこと

#### 【包装】

アプリケーター：500 本入り×1 袋  
ホルダー：4 本

#### 【文献請求先】

〒176-0013  
東京都練馬区豊玉中 2-18-14  
株式会社コサカ

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ  
住 所：〒176-0013  
東京都練馬区豊玉中 2-18-14  
電話番号：03-3557-4111(代表)  
第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：Young Microbrush LLC  
(アメリカ合衆国)