


再使用禁止

販売名：外科用バキューム

【禁忌・禁止】

- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 再使用はしないこと。
- オートクレーブ滅菌不可
- 感染防止のため、清潔なものを使用すること。

【形状・構造及び原理等】

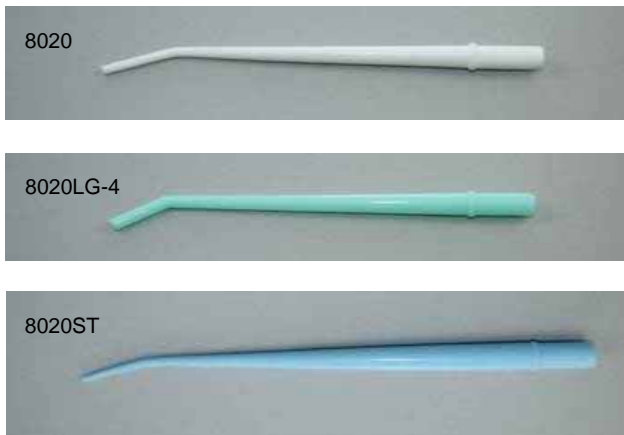

サイズ(mm)

規格	全体長	先端直径	末端直径	末端部分長
8020	165	3.2	11	20
8020LG-4	160	6	11	20
8020ST	190	1.9	11	20

末端：バキューム連結部

原材料 PP(ポリプロピレン)

【性能・使用目的・効能又は効果】

非能動吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる管状の歯科用器具で、歯科治療中に口腔内にたまった水分や切削片を除去する。

本品は単回使用である。
オートクレーブ不可

【品目仕様等】

ISO 13485:2003の規準に対応

【操作方法又は使用方法等】

歯科専用装置(バキューム)に連結して、歯科治療中に口腔内に貯留する水分や切削片を除去する。

【使用上の注意】

器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。

歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

使用目的以外に使用しないこと。

必要以上の力を加えないこと。

破損や事故の原因となるので、切削・打刻・曲げなどの改造は絶対に行わないこと。

使用前に十分な洗浄・消毒をすること。

使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液や精製水に付ける事。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。

洗浄後は乾燥させて保管すること。

血液、体液、組織及び薬品が付着したまま保管しないこと。

汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管、管理すること。

水分が付着したまま保管しないこと。

保管有効期間は特にないが、劣化や異常が見られる場合は使用を差し控えること。

【包装】

一袋 25 本入り

封印：加熱シーリングにより密閉し、塵や埃が混入せず、一度開封されたことが明確に分かるように包装されている。

【文献請求先】

〒176-0013

東京都練馬区豊玉中 2-18-14

株式会社コサカ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ

住所：〒176-0013

東京都練馬区豊玉中 2-18-14

TEL: 03-3557-4111(代表)

第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：Hsiner Co., Ltd. (台湾)