

器 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般的名称：再使用可能な歯科用吸引カニューレ 38759000
ソフトチップ

【警告】

- 1) 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- 2) 感染を防ぐために使用前は必ず滅菌すること。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は使用をやめること。

【禁忌・禁止】

- 1) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 器具の形態変更や改造等はしないこと。
- 3) 長期使用した場合や機能の低下が目立った場合は使用を中止し、適切に廃棄すること。

【形状・構造及び原理等】

形状：



構造： 9mm及び 11mmの硬質バキュームチップに
接続対応可能
材質：シリコーンゴム

【使用目的、効能又は効果】

非能動型の歯科専用吸引装置に連結して用いる管状の
歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去
するために用いる。本品は滅菌後に再使用する。

【品目仕様等】

外観にキズ、汚れ、異物等の付着のないこと。

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 本品は未滅菌なので、オートクレーブ等で滅菌後
使用すること。
- 2) 接続する器具類にしっかり接続して口腔内に貯留
する水分や切削片の吸引・除去を行う。

【使用上の注意】

- 1) 器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守る
こと。
- 2) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 3) 使用目的以外に使用しないこと。必要以上の力を
加えないこと。
- 4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬
品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液や精製水に
漬けること。
- 5) 長期の使用により、疲労や摩擦等の劣化が生じる
ので適時交換すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、
管理すること。
- 2) 洗浄後は、水分を完全に除去し、直射日光及び
高温多湿を避けて保管する。
- 3) 血液・体液・組織及び薬品が付着したまま保管し
ないこと。
- 4) 使用条件にもよりますが、オートクレーブ 100 回
を目安に交換してください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 洗浄装置で洗浄する時は、器具同士が接触して損
傷することがないように注意すること。
- 2) 使用前に、汚れ・傷・曲がり・破損等異常がない
か点検すること。
- 3) 点検後、オートクレーブ滅菌等を行うこと。器具
同士が接触しないよう配置し、確実に滅菌でき
るように配慮すること。
- 4) 本品の耐熱温度は 135 である。耐熱温度を超え
ると変形・溶解する恐れがあるので、オートクレー
ブ庫内温度に注意すること。

【包装】

10 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者及び製造業者：株式会社コサカ

住所：〒176-0013

東京都練馬区豊玉中 2-18-14

電話番号：03-3557-4111 (代表)

(文献請求先も同じ)

第 3 種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

医療機器製造業届出 13BY000991