

機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管  
再使用可能な歯科用吸引カニューレ 38759000

### 販売名：モノアートE M40 アスピレーターチップ

#### 【禁忌・禁止】

- 歯科医療従事者以外使用禁止
- 感染防止のため、清潔なものを使用すること。
- 未滅菌なので使用前にオートクレーブ等で滅菌すること。
- 滅菌後、小さくとも歪みや破損を発見したら、直ちに廃棄し、新品(滅菌済)を使用すること。

#### 【形状・構造及び原理等】



原材料：ポリプロピレン

全長：200mm

先端外径：1.2mm / 内径：1.0mm

バキューム連結部径：11mm

#### 【性能・使用目的・効能又は効果】

歯科用バキュームチップ(再使用可能)  
歯科治療中に口腔内にたまった水分や切削片を除去する。

#### 【品目仕様等】

ISO 13485:2012、ISO9001:2008の規準に対応

#### 【操作方法又は使用方法等】

歯科専用装置(バキューム)に連結して、歯科治療中に口腔内に貯留する水分や切削片を除去する。

未滅菌なので使用前にオートクレーブ等で滅菌する。

#### 【使用上の注意】

器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。

歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

使用目的以外に使用しないこと。

必要以上の力を加えないこと。

破損や事故の原因となるので、切削・打刻・曲げなどの改造は絶対に行わないこと。

未滅菌なのでオートクレーブ等で滅菌後使用する。

耐熱温度:134

オートクレーブ:134 /5分、121 /15分

低温乾燥可

NクラスAC-乾燥不可

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。

汚染等を防ぐため、清潔で湿度が高くない場所にて保管、管理すること。

水分が付着したまま保管しないこと。

#### 【包装】

一袋10本入り

#### 【文献請求先】

〒176-0013

東京都練馬区豊玉中2-18-14

株式会社コサカ

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社コサカ

住所：〒176-0013

東京都練馬区豊玉中2-18-14

電話番号：03-3557-4111(代表)

第3種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

外国製造業者：EURONDA SPA(イタリア国)