

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 70911000

バイオジェル デンタル

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

再使用禁止。
天然ゴムラテックスによるアレルギー反応を起こすおそれのある
医療従事者および患者への使用は禁止。

【形状、構造及び原理等】

本品は、天然ゴムからなる未滅菌の使い捨てパウダなし歯科用手袋である。左右の区別がある。

1. 形状
 - ・形状 S（直指形手袋）
 - ・表面仕上げ T（表面の一部又は全面が粗面の手袋）
 - ・パウダなし
 - ・左右の区別あり
2. 材質
 - 天然ゴムラテックス

【使用目的、効能又は効果】

歯科の診察、治療及び処置に用いる天然ゴム製手袋である。

【操作方法及び使用方法等】

本品を箱より取り出し、左右の手に装着する。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (1) 本品は、天然ゴムを使用しており、天然ゴムによる、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、ぜんそく様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状を起こす可能性がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
 - (2) 使用中、穴が開いたり破れたりした場合は、新しい製品に交換すること。
2. 相互作用
 - (1) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので注意すること。
3. その他の注意
 - (1) 電気メス等の使用において、高周波電流の形成により熱傷を起こす可能性があるため、注意すること。
 - (2) 使用後の廃棄の際は、感染防止に配慮し適切に処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
使用期限は外箱に記載（自己認証データによる。）

**【包装】

サイズ 5.5～8.5：150 双入/箱（25 双×6）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：メンリッケヘルスケア株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-20-7
コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト
電話 03-6914-5006

製造業者（国名）：
メンリッケヘルスケア Sdn. Bhd.（マレーシア）
Molnlycke Health Care Sdn. Bhd.