

2024/6/21(第1版)

届出番号 13B3X00551000277

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

販売名:コサカニトリルグローブ

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】




- 原材料:ニトリル(合成ゴム)
- パウダーフリー
- 未滅菌の使い捨て形式の検査・検診用手袋

<寸法>

ASTM 規格

サイズ	A (mm)	B (mm)	厚み(mm)	
			指	掌
XS	240+	70±10	0.06+	0.05+
S		80±10		
M		95±10		
L		110±10		

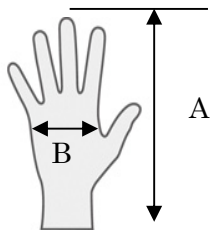

【品目仕様等】

- 左右兼用手袋
- 指先梨地
- 色:ホホワイト

【性能・使用目的・効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【操作方法又は使用方法等】

化粧箱の取り出し口より本品を丁寧に取り出し、手に装着して検査・検診処置に用いる。使用後は必ず廃棄する。

【使用上の注意】

- 1) 使用中にかゆみ、かぶれ、発疹などのアレルギー性症状を起こすことがある。このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- 2) 薬品、溶剤等によって膨潤したり、浸透したりする場合があるので確認して使用すること。
- 3) 包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常(破損やピンホール等)が見られるものは使用しないこと。
- 4) 刃物など鋭利な器具に触れると破れるあるいは穴があくことがあるので注意すること。
- 5) 複数の患者には使用しないこと。
- 6) 使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 2) 包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けること。

【包装】

一箱 200 枚入り

【商品に関する問い合わせ先】

株式会社コサカ

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14

TEL: 03-3557-4111(代表)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者

株式会社コサカ

東京都練馬区豊玉中 2-18-14

製造業者

Top Quality Glove Sdn. Bhd. F31 (マレーシア)

株式会社コサカ

コサカ商品センター